

RS Narrow Kullanım Önerisi



Apekte ulaşan ilk alet 6-8-10 olduğu vakalarda #15 numaralı eğeye kadar genişletin.



"N1" ile kalın koroner bölümünü genişletin.



"N2" ile çalışma boyunda ön genişletme yaparak rehber yol oluşturun.



"N3" ile ÇB'de genişletme yapın. Eğer 31G irrigasyon iğnesi kullanıyorsanız şekillendirmeyi bu aşamada bırakabilirsiniz.



"N4" ile son genişletmeyi yapıp, şekillendirmeyi bitirin.

RS Medium Kullanım Önerisi



Apekte ulaşan ilk alet #20 numaralı el eğesi ise;



"M1" ile kanalı genişletin.



"M2" ile şekillendirmeyi bitirin veya kanal daha genişse "M3" ile devam edin.



"M3" ile şekillendirmeyi bitirin. (ÇB'ye ulaşan ve hafifçe sıkışan ilk aletten 2 üstüne kadar açılı genişletme yeterlidir.)

RS Large Kullanım Önerisi




Apekte ulaşan ilk alet #30 numaralı el eğesi ise;



"L1" ile kanalı genişletin.



"L2" ile şekillendirmeyi bitirin veya kanal daha genişse "L3" ile devam edin.

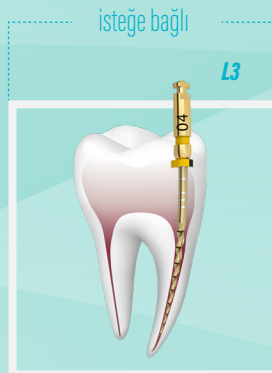

"L3" ile şekillendirmeyi bitirin. (ÇB'ye ulaşan ve hafifçe sıkışan ilk aletten 2 üstüne kadar açılı genişletme yeterlidir.)